

Contam<sup>®</sup> Vaginal tampons





# Kennen Sie das?

- Belastungs(Stress)Inkontinenz
- Mischinkontinenz
- Stärkung / Aktivierung der Beckenbodenmuskulatur
- Vaginalprolaps

### Wieder aktiv sein mit Contam®

Blasenschwäche ist ein sehr persönliches Problem. Wir möchten, dass Sie sich selbst helfen können. Zur natürlichen Selbstbehandlung bei Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden haben wir einen Tampon entwickelt, der die Lebensqualität erhält bzw. zurückbringt. Die Scheidensekretion bleibt erhalten und die normale Scheidenflora wird nicht beinträchtigt. Der für Contam® verwendete Rohstoff ist ein toxikologisch und dermatologisch unbedenklicher Schaumstoff.

### So funktioniert Contam®

Contam® vaginal platziert saugt keinen Urin auf. Contam® hebt die vordere Scheidenwand, stützt den Blasenhals und führt diesen in die ursprüngliche Position zurück. Contam® weckt bei der Trägerin die bewusste Wahrnehmung des Beckenbodens. Ist dieses Gefühl hergestellt, wird die Muskulatur passiv wie aktiv trainiert.

> Vorteil: Sie, als Betroffene, können den Tampon selbst einsetzen und entfernen.

## Contam<sup>®</sup> Normalausführung

Empfohlen u.a. vom Team der Frauen-

Faden: Baumwolle Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004 Material: PVA Schaumstoff





Ohne Tampon: Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung: Tampon im Vaginalbereich übt Druck auf Harnröhre aus. Damit wird unkontrollierter Harnabgang verhindert (Tampon in eine für Sie angenehme Position bringen).



Falsche Anwendung: Tampon ist zu tief die Scheide eingeführt.

Alle Anwendungshinweise finden Sie auf Seite 16.

#### Blasenschwäche

Contam

Anwendung bei Belastungsinkontinenz und Mischinkontinenz mit Drangproblematik sowie zur Stärkung / Aktivierung der Beckenbodenmuskulatur. Durch Contam® wird ungewollter Harnverlust verhindert.

	Ů	, ,	· ,		
5900	Startset	Mini Ø22	60	01666592	3 St.
		Regular Ø28	60		
		Extra Ø33	65		
6220	Mini	Ø22	60	01595283	10 St.
				00652091	20 St.
				00652116	50 St.
6260	Regular	Ø28	60	01595308	10 St.
				00652151	20 St.
				00652168	50 St.
6330	Extra	Ø33	65	01595277	10 St.
				00652180	20 St.
				00652197	50 St.
6400	Extra-Plus	Ø40	65	02518617	10 St.
				02518646	20 St.
				02518652	50 St.
6450	Super-Plus	Ø45	65	03409988	10 St.
				03410112	20 St.
				03410106	50 St.

Durchmesser (mm)\* Länge (mm)\*

PZN

So wählen Sie die richtige Größe: Mit dem Startset (verordnungsfähig), bestehend aus 3 Tampons (je 1x Mini, Regular, Extra), können Sie individuell die richtige Größe auswählen.

Art. Nr. Bezeichnung

<sup>\*</sup> Zirkawerte in feuchtem Zustand

# Contam® Normalausführung

Empfohlen u.a. vom Team der Frauen-

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle





Ohne Tampon: Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung: Tampon ist tief genug in die Scheide



Falsche Anwendung: Tampon ist nicht tief genug in die Scheide eingeführt.

## Senkungsbeschwerden

Anwendung bei manueller Rückführung von Vaginalprolaps und Gebärmuttervorfällen. Der Tampon verhindert im Vaginalbereich das partielle bzw. vollständige Ausstülpen der Vagina oder Gebärmutter.

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser (mm)*	Lange (mm) <sup>-</sup>	PZN	Menge
5950	Startset	Extra Ø33	65	10408966	3 St.
		Extra-Plus Ø40	65		
		Super-Plus Ø45	65		
6330	Extra	ø33	65	01595277	10 St.
				00652180	20 St.
				00652197	50 St.
6400	Extra-Plus	Ø40	65	02518617	10 St.
				02518646	20 St.
				02518652	50 St.
6450	Super-Plus	Ø45	65	03409988	10 St.
				03410112	20 St.
				03410106	50 St.





\* Zirkawerte in feuchtem Zustand

## Contam<sup>®</sup> Würfeltampon

(

**Empfohlen u.a.** vom Team der Frauenklinik Hagen-Haspe, Chefarzt Dr. med. Kociszewski (AGUB III)

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle





**Ohne Tampon:** Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung bei Senkungsbeschwerden: Würfel ist tief genug in die Scheide eingeführt.



Richtige Anwendung bei Senkungsbeschwerden mit versteckter Blasenschwäche: Würfel mittig platziert übt zusätzlichen Druck auf den Harnröhrenbereich aus.

## Blasenschwäche / Senkungsbeschwerden

Mit dem Contam® Vaginaltampon in Würfelform können verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmuttersenkung sowie Blasenentleerungsstörungen behandelt werden.



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)*	PZN	Menge
6000	Startset	Größe 1 32x32	10992669	3 St.
		Größe 2 37x37		
		Größe 3 42x42		
6100	Größe 1	32x32	10796922	5 St.
			10796939	20 St.
6150	Größe 2	37x37	10796945	5 St.
			10796951	20 St.
6200	Größe 3	42×42	10992675	5 St.
			10992706	20 St.
6205	Größe 4	50x50	11615207	5 St.
			11615213	20 St.
6210	Größe 5	55x55	11615242	5 St.
			11615259	20 St.

**So wählen Sie die richtige Größe:** Mit dem Startset (verordnungsfähig), bestehend aus 3 Tampons (je 1x Größe 1, Größe 2, Größe 3), können Sie individuell die richtige Größe auswählen.

<sup>\*</sup> Zirkawerte in feuchtem Zustand

# Contam<sup>®</sup> verkürzte Ausführung

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle



### Die kurze Antwort auf viele urogynäkologische Probleme

Bislang waren Contam® in zylindrischer Tampon- und Würfelform für urogynäkologische Anwendungen in einer großen Auswahl von unterschiedlichen Formen vorhanden, dennoch konnten damit einige Frauen nicht versorgt werden.

- Scheiden nach operativen Eingriffen: Narben und Verkürzung verhindern eine korrekte Platzierung eines "klassischen" Tampons
- pensionen oder Bandimplantantationen infolge Absenkung der Blasenbasis durch Traktionszystozelen
- Apikale Scheidensensibilitäten nach Versorgung von Vorder- und Hinterwand mit (zu kurzen) Implantaten.
- Stützen der apikalen Scheide bei Sport und körperlicher Belastung
- Ausfüllen der supraevatoriellen Beckenbodenkavität zum Abstützen und Schutz vor Deszensus(-rezidiv).

### Blasenschwäche / Senkungsbeschwerden

Der verkürzte Tampon bietet Ihnen Sicherheit, wenn durch Operationen oder Senkungszuständen die normale Länge nicht komfortabel ist.



Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser*	Länge*	PZN	Menge
6220 V40	Mini verkürzt	Ø22 mm	40 mm	19278123	10 St.
				19278235	50 St.
6220 V45		Ø22 mm	45 mm	19278146	10 St.
				19278241	50 St.
6260 V40	Regular verkürzt	Ø28 mm	40 mm	19278152	10 St.
				19278258	50 St.
6260 V45		Ø28 mm	45 mm	19278169	10 St.
				19278264	50 St.
6330 V40	Extra verkürzt	Ø33 mm	40 mm	19278175	10 St.
				19278270	50 St.
6330 V45		Ø33 mm	45 mm	19278181	10 St.
				19278287	50 St.
6400 V40	Extra-Plus verkürzt	Ø40 mm	40 mm	19278198	10 St.
				19278293	50 St.
6400 V45		Ø40 mm	45 mm	19278206	10 St.
				19278301	50 St.
6450 V40	Super-Plus verkürzt	Ø45 mm	40 mm	19278212	10 St.
				19278318	50 St.
6450 V45		Ø45 mm	45 mm	19278229	10 St.
				19278324	50 St.

\* 7irkawerte in feuchtem 7ustand

# Contam® mit Innenbohrung

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004 Material: PVA Schaumstoff Faden: Baumwolle

C Alle Anwendungshinweise finden Sie auf Seite 16.

## Blasenschwäche / Senkungsbeschwerden

Durch die Innenbohrung kann der Tampon mithilfe eines zusätzlich verordneten Applikators einfacher eingeführt und in die gewollte Position gebracht werden. Besonders für Patientinnen mit eingeschränkter Mobilität kann dies vorteilhaft sein.


Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser*	Länge*	PZN	Menge
6220 I	Mini	Ø22 mm	60 mm	14022235	10 St.
	mit Innenbohrung			14022264	50 St.
62601	Regular mit	Ø28 mm	60 mm	14022270	10 St.
	Innenbohrung			14022287	50 St.
63301	Extra mit	Ø33 mm	65 mm	14022293	10 St.
	Innenbohrung			14022301	50 St.
6400 I	Extra-Plus mit	Ø40 mm	65 mm	14022318	10 St.
	Innenbohrung			14022324	50 St.
64501	Super-Plus mit	Ø45 mm	65 mm	14022330	10 St.
	Innenbohrung			14022347	50 St.
7200	Applikator groß	-	-	02014845	1 St.

#### Für Ihren Arzt / Ihre Ärztin:

Bei Erstverordnung ist es zwingend nötig, einen Applikator zu verordnen.

\* Zirkawerte in feuchtem Zustand

### Hinweise für Ihren Arzt / Ärztin

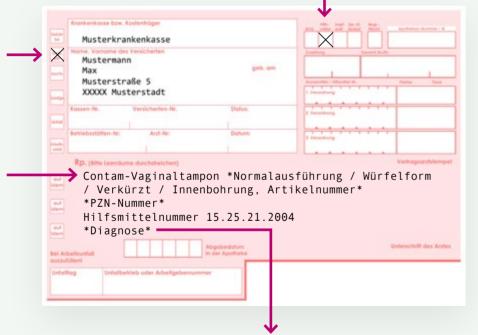

#### Das Rezept sollte enthalten:

- PZN-Nummer
- Hilfsmittelnummer: 15.25.21.2004
- Indikation (Krankheitsbild)
- Produktbezeichnung
- Größe / Form / Menge / Artikelnummer
- Bei Bedarf: Verkürzung

z.B. N39.3 (Blasenschwäche) z.B. N81.1 (Senkungsbeschwerden)

## Bezugsquellen



#### Fachhandel

Reichen Sie Ihr Rezept bei einem Hilfsmittel-Vertragspartner Ihrer Krankenkasse ein (z. B. Apotheke/Homecare-Unternehmen/Sanitätshaus) Diese übernehmen den gesamten Genehmigungs- und Bestellvorgang, sowie die Abrechnung des Medizinproduktes.

#### **=**□ Direktbezug über Med SSE

Senden Sie das Rezept per Post an unsere Anschrift. Wir sind Vertragspartner vieler Krankenkassen. Eine Auflistung finden Sie unter www.medsse.de.

#### Online-Shop

Bestellen Sie schnell, einfach und beguem, auf eigene Rechnung, in unserem Online-Shop.

www.medsse.de/shop





### Anwendungshinweise

- Vor der Verwendung bitte gründlich die Hände waschen.
- Contam® aus der Verpackung nehmen, Schutzfolie an der Perforierung aufreißen, Tampon entnehmen und Rückholfaden abwickeln.
- Contam® kurz in warmem Wasser einweichen (ca. 1 Minute).
- Restflüssigkeit ausdrücken. Contam® wird weich und elastisch und kommt so zur Anwendung.
- Contam<sup>®</sup> ist vaginal einzuführen. Nehmen Sie dazu eine begueme Position ein.
- Wechseln Sie den Tampon aus hygienischen Gründen nach 12 Stunden (Beim Toilettengang muss der Tampon nicht entfernt werden).
- Entsorgung über den Hausmüll.

#### Anwendung bei Inkontinenz (Blasenschwäche):

Führen Sie Contam® mit den Fingerspitzen tief in die Scheide ein, ziehen Sie den Tampon dann etwas zurück. damit er mit den Fingerspitzen wieder tastbar ist.



#### Anwendung bei Senkungsbeschwerden:

Führen Sie Contam® mit den Fingerspitzen so tief wie möglich in die Scheide ein. Hinweis: Tampon / Würfel kann nicht in den Körper abaleiten.



#### **ODER:**

#### Anwendung bei Contam® Innenbohrung:

Tampon mit der Innenbohrung auf den Dorn des Applikators aufstecken und Tampon einführen.







Alfred von der Lehr

Herderstraße 5-9 D-90427 Nürnberg Tel.: 0911 / 790 88 06

Fax: 0911 / 79 23 37 www.medsse.de info@medsse.de

