


# A-Tam<sup>®</sup> Analtampons

aus PVA (Polyvinyl - Alkohol - Schaumstoff)

## Gebrauchsanleitung

Lesen Sie bitte auch die weiteren Hinweise/Empfehlungen.

Bitte gehen Sie wie nachstehend in Wort und Bild beschrieben bei der Einführung des Tampons vor. Die Vorgehensweise ist vergleichbar wie bei einem Suppositorium (Zäpfchen). Dieses Produkt ist aufgrund der allgemein geltenden Hygienevorschriften ein Einmalprodukt . Die Einführhilfe (Applikator) ist mehrfach verwendbar.




1

Hände mit Wasser und Seife waschen.




2

Analbereich sorgfältig reinigen.

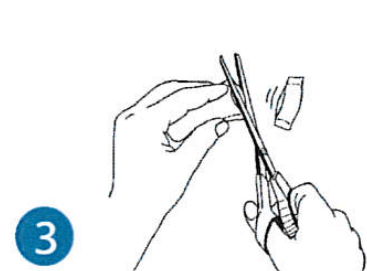


3

Schutzfolie entfernen.

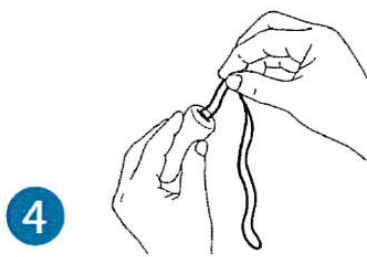

4

Rückhofaden aus der Innenbohrung ziehen.

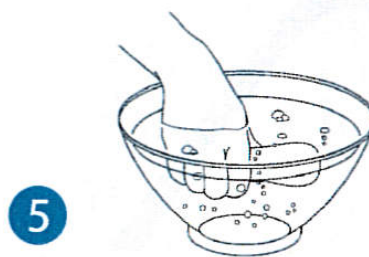


5

Tampon im warmen Wasser kurz einweichen.




6

Überschüssiges Wasser ausdrücken. Nicht wringen!

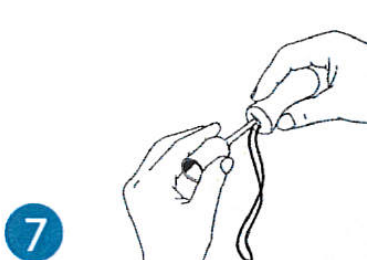


7

Tampon mit der Innenbohrung auf den Dorn des Applikators aufstecken. Je nach Bedarf kann Vaseline auf die Tamponkuppe aufgetragen werden, um ein besseres Gleiten zu erreichen.

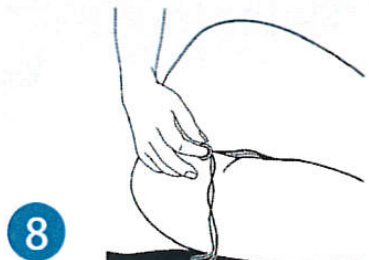

8

Tampon mit Applikator weit genug in den Darmkanal einführen, so dass der Rückhofaden sichtbar ist (siehe Abbildung).

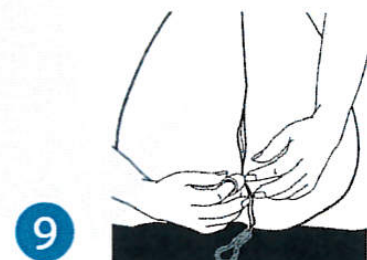

9

Beim Herausziehen des Applikators die Gesäßbacken zusammenkneifen.



10

Den Rückhofaden mit einem Heftpflaster an der Gesäßbacke festkleben. Gegebenenfalls Anal-sicherung verwenden.



11

Nach der Tamponversorgung Hände gründlich waschen.



12

Den Tampon mit dem Rückhofaden entfernen und über den Hausmüll, nicht durch die Toilette entsorgen!

## Hinweise/Empfehlungen

- Vor dem Einführen Darm entleeren
- Durch Toilettentraining Darm an gleichbleibende Entleerungszeit gewöhnen
- Bei Erstverwendung mit kleinen Größen beginnen
- Dorn des Applikators evtl. mit Vaseline bestreichen – leichtes Lösen
- Kneifreflex (ca. 15 bis 20 Sekunden) abwarten \*\*\*
- Tampon nach maximal 6-8 Stunden entfernen
- Durch Ziehen am Rückholfaden wird der Tampon aus dem Analkanal entfernt
- Sollte der Rückholfaden trotz laufender Kontrollen beim Entfernen des Tampons reißen und Sie dadurch den Tampon nicht herausziehen können, bitten wir Sie den Arzt aufzusuchen
- Für weitere Bestellungen bitte jeweils ein Rezept Ihres Arztes an uns schicken

\*\*\*Dieser Reflex tritt nach einer Eingewöhnungszeit von ca. 5-6 Wochen nicht mehr auf

## Kontraindikationen /besondere Hinweise:

- Bei bekannten Unverträglichkeiten gegen PVA\*-Schaum sollte der A-Tam<sup>®</sup> nicht angewendet werden.

## Umtausch

Wenn Sie aus dem Startsortiment die richtige Größe und Form ermittelt haben:

1. Sie markieren bitte die von Ihnen gewünschte Tampongöße und Tamponform deutlich auf dem Umtauschformular
2. Sie entnehmen und behalten bitte die beiden Applikatoren (klein für unterwegs, groß = für zuhause)
3. Sie senden bitte die unbenutzten Tampons an die Firma Med SSE zurück
4. Wir tauschen die unbenutzten Tampons kostenfrei in die von Ihnen gewählten Größen um
5. Wir schicken Ihnen umgehend nach Erhalt die gewünschten Tampons

## Hersteller:



Herderstraße 5-9 · D-90427 Nürnberg  
info@medsse.de · www.medsse.de

Wir stehen Ihnen gerne von

Montag bis Donnerstag      8<sup>30</sup> bis 16<sup>30</sup>  
und Freitag                      8<sup>30</sup> bis 13<sup>00</sup>

telefonisch zur Verfügung

**Tel. 0911 / 7 90 8806**

**Material: Polyvinylalkoholschaumstoff\* - Faden: Baumwolle**



Bitte Gebrauchsanleitung beachten



Einmalgebrauch



0197

Med SSE System GmbH übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden bei unsachgemäßer Anwendung.