

Contam®

...per la vostra sicurezza!

TAMPONE VAGINALE (CUBO)



N° articolo	Denominazione	Dimensioni* (umido)	PZN	Pezzi
6000	Set iniziale	3 misure / 32, 37, 42 mm	10992669	3 pz.
6100	Cubo Misura 1	32 x 32 mm	10796922 10796939	5 pz. 20 pz.
6150	Cubo Misura 2	37 x 37 mm	10796945 10796951	5 pz. 20 pz.
6200	Cubo Misura 3	42 x 42 mm	10992675 10992706	5 pz. 20 pz.
6205	Cubo Misura 4	50 x 50 mm	11615207 11615213	5 pz. 20 pz.
6210	Cubo Misura 5	55 x 55 mm	11615242 11615259	5 pz. 20 pz.

* La lunghezza e il diametro riportati sono valori indicativi al momento dell'utilizzo (allo stato umido).


Indicazioni:

Il tampone vaginale Contam® a forma di cubo è indicato per il trattamento dei vari gradi di prolasso pelvico e uterino, nonché nei disturbi dello svuotamento vescicale.

Applicazione e azione terapeutica di


Contam®

Applicazione corretta in presenza di disturbi da prolasso

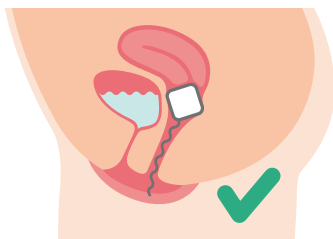

Il cubo è inserito a una profondità adeguata nella vagina!

Applicazione corretta in presenza di disturbi da prolasso con problemi di incontinenza velati

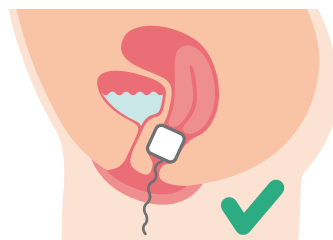

Il cubo in posizione centrale esercita inoltre pressione sulla zona uretrale!

Indicazioni e istruzioni per l'uso

1 Lavarsi accuratamente le mani prima dell'uso.



2 Strappare la pellicola protettiva in corrispondenza della perforazione, estrarre il tampone e tirare il cordoncino.



3 Mettere Contam® brevemente in ammollo in acqua calda (ca. 1 minuto).



4 Strizzare per eliminare l'acqua in eccesso. Contam® diventa morbido ed elastico e può quindi essere applicato.



5 Contam® va inserito allo stesso modo di un tampone mestruale. Assumere una posizione comoda, per esempio mettendo un piede su uno sgabello o sedendosi sul bordo del WC.

6 Utilizzo in caso di disturbi da prolasso

A Inserire Contam® con la punta delle dita in profondità nella vagina.




6 Utilizzo in caso di disturbi da prolasso con

B problemi di incontinenza velati
Posizionare Contam® a forma di cubo in posizione centrale per esercitare una pressione aggiuntiva sulla zona uretrale.



7 Se si dovesse avvertire una sensazione di fastidio, portare il tampone in una posizione comoda con la punta delle dita. Nella parte centrale della vagina si trovano solo pochi nervi. Pertanto, se posizionato correttamente, non si percepisce Contam®.

8 L'estremità del cordoncino per la rimozione deve trovarsi esternamente alla vagina.

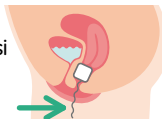

9 Assumere una posizione comoda anche per la rimozione di Contam®. Tirare il cordoncino per stabilire la migliore direzione di estrazione.

10 Infilare il tampone Contam® usato in una bustina e smaltirlo attraverso i rifiuti domestici. Si raccomanda di lavarsi le mani dopo aver rimosso e smaltito Contam®.



Avvertenze di sicurezza:

- Sostituire Contam® dopo aver nuotato/fatto il bagno
- Se nonostante i nostri controlli accurati e continui il cordoncino di estrazione dovesse spezzarsi, cercare di afferrare ed estrarre il tampone con le dita portandovi in posizione accovacciata e spingendo (come per andare di corpo). Se non si riesce ad estrarlo, consultare immediatamente un medico
- Contam® è un prodotto monouso e non può essere riutilizzato. In caso di ripetuto utilizzo non si garantiscono più le condizioni igieniche.
- Contam® non deve essere lasciato in vagina per più di 12 ore. Le pazienti che non sono in grado di verificare tale durata non devono utilizzare Contam®
- Se durante l'utilizzo di Contam® dovessero verificarsi episodi improvvisi di febbre, diarrea, vomito, sanguinamento, vertigini oppure irritazione cutanea, estrarre immediatamente il tampone e consultare un medico

Controindicazioni (non utilizzare Contam®):

- allergie al PVA
- ciclo mestruale
- quando si dorme o in presenza di infiammazioni
- consultare un medico prima dell'uso se è in corso una gravidanza

Effetti collaterali: Non sono noti effetti collaterali

Marcatura dei dispositivi medici:

Sulla confezione e nei documenti di accompagnamento dei tamponi vaginali Contam® sono riportati dei simboli grafici spiegati qui di seguito:

- CE Simbolo per "Conforme alle direttive europee vigenti"
- ⊗ Simbolo per "Non riutilizzare"
- 📖 Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso"
- 🏭 Simbolo per "Produttore"
- 🕒 Simbolo per "Data di scadenza"
- 🎰 Simbolo per "Codice lotto"
- MD Simbolo per "Dispositivo medico"
- ☀️ Simbolo per "Proteggere dai raggi solari"
- ☔ Simbolo per "Conservare in luogo asciutto"

Presidio n° 15.25.21.2004

Informazioni sui materiali: CE 0197

Tampone: schiuma PVA, Cordoncino: cotone

In caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso Med SSE declina ogni responsabilità per i danni derivanti.

Med SSE System
GmbH
Alfred von der Lehr

Herderstraße 5-9 · 90427 Nürnberg · Deutschland
Tel. 0911 / 7 90 88 06 · Fax 0911 / 79 23 37
www.medsse.de · E-Mail: info@medsse.de

Distributore:
SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
Fabrikstr. 2 6460 Imst/Tirol
Tel: 0043 5412 6189123